



“十美牌”包裝消毒袋

SIGMA Sterilization Pouch 衛署醫器製字第 001212 號

產品使用說明書

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

保存方式: 避免高溫,強光及潮濕,若是消毒袋或管袋破損,請勿使用

使用說明:

- 管袋:**
1. 裁切適當長度
 2. 使用封口機封合一邊
 3. 將待滅菌物品置於袋內
 4. 將消毒袋另一邊以封口機封合,送入滅菌裝置內

- 個體袋:**
1. 將待滅菌物品置於袋內
 2. 將消毒袋另一邊以封口機封合,送入滅菌裝置內

- 自黏袋:**
1. 將滅菌物品置於袋內
 2. 將袋口雙面膠帶離型紙撕下
 3. 沿切割線將雙面膠對折,使封合處緊密無空隙
 4. 將消毒袋送入滅菌裝置內

產品名稱		包裝消毒袋	
產品 材質	印刷面	醫療用紙	Tyvek
	貼合面	塑膠薄膜(PET+CPP)	塑膠薄膜(PET+PE)
封口方式		<ol style="list-style-type: none"> 1. 將消毒袋輕輕撐開,放入預滅菌之物品至消毒袋底部 2. 調整封口機至適當溫度 3. 將消毒袋開口端拉平,放入踏板式或滾輪式封口機中,進行封口工作 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調整封口機至適當溫度 2. 剪裁適當長度消毒袋 3. 先將消毒袋一端拉平,放入踏板式或滾輪式封口機中,進行封口工作 4. 放入預滅菌之物品 5. 再將消毒袋另一端拉平,放入踏板式或滾輪式封口機中,進行封口工作,此端封口處與消毒袋底端距離需空出 25mm~35mm,以利撕袋
封口溫度		建議使用 160°C~200°C 之封口溫度進行封口工作	建議使用 115°C~125°C 之封口溫度進行封口工作
滅菌方式		本消毒袋可適用於下列滅菌方式: <ol style="list-style-type: none"> 1. 高溫高壓滅菌(Steam)132°C,20 分鐘(持溫時間)或 121°C 30 分鐘(持溫時間) 2. 環氧乙烷滅菌(Ethylene Oxide) 	本消毒袋可適用於下列消毒方式: <ol style="list-style-type: none"> 1. 環氧乙烷滅菌(Ethylene Oxide) 2. 過氧化氫電漿滅菌(H2O2, Plasma)
儲存環境		保存於陰涼環境,避免高溫,潮濕及強光照射	
撕袋方式		<ol style="list-style-type: none"> 1. 先將消毒袋長端處側封(固定點)小心撕開 2. 雙手平握住消毒袋兩面,以緩慢,小心的方式,平均施力向兩側拉開至 1/2~2/3 處,取出消毒物品使用 	
有效期間		本產品未經滅菌且儲存於正確時間下時,可保存 3 年	本產品未經滅菌且儲存於正確時間下時,可保存 5 年

產品名稱	包裝消毒袋	
產品 材質	印刷面	PE 複合薄膜
	貼合面	PE 複合薄膜
封口方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將消毒袋輕輕撐開, 放入預滅菌之物品至消毒袋底部 2. 調整封口機至適當溫度 3. 將消毒袋開口端拉平, 放入踏板式或滾輪式封口機中, 進行封口工作 	
封口溫度	建議使用 130°C~190°C 之封口溫度進行封口工作	
消毒方式	本消毒袋可適用於下列消毒方式: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gamma 滅菌 25~45kGy 	
儲存環境	保存於陰涼環境, 避免高溫, 潮濕及強光照射	
撕袋方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先將消毒袋長端處側封(固定點)小心撕開 2. 雙手平握住消毒袋兩面, 以緩慢, 小心的方式, 平均施力向兩側拉開至 1/2~2/3 處, 取出滅菌物品使用 	
有效期間	本產品未經滅菌且儲存於正確時間下時, 可保存 3 年	

醫療器材名稱：聯和醫療器材股份有限公司

醫療器材地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品需刊載實際地址)

製造業者名稱：聯和醫療器材股份有限公司委託明基材料股份有限公司 雲科製造三廠製造

製造業者地址：雲林縣斗六市虎溪里科工十八路 18 號



“十美牌”包裝消毒袋

SIGMA Sterilization Pouch

衛署醫器製字第 001212 號

A. 標準品規格:

I. 醫療紙 Medical Paper

產品名稱 Product Name	產品編號 Product Code	產品材質 Product Material	產品規格 Product Specification	
平面管袋 Sterilization Rolls, Flat	SMFR050200	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	50 mm x 200M
	SMFR075200			75 mm x 200M
	SMFR100200			100 mm x 200M
	SMFR150200			150 mm x 200M
	SMFR200200			200 mm x 200M
	SMFR250200			250 mm x 200M
	SMFR300200			300 mm x 200M
	SMFR350200			350 mm x 200M
	SMFR400200			400 mm x 200M
	SMFR050030			50 mm x 30M
	SMFR075030			75 mm x 30M
	SMFR100030			100 mm x 30M
	SMFR150030			150 mm x 30M
	SMFR200030			200 mm x 30M
	SMFR250030			250 mm x 30M
	SMFR300030			300 mm x 30M
SMFR350030	350 mm x 30M			
SMFR400030	400 mm x 30M			
立體管袋 Sterilization Rolls, Gusseted	SMGR075100	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	75 mm x 35 mm x 100 M
	SMGR100100			100 mm x 40 mm x 100 M
	SMGR150100			150 mm x 50 mm x 100 M
	SMGR200100			200 mm x 50 mm x 100 M
	SMGR250100			250 mm x 60 mm x 100 M
	SMGR300100			300 mm x 70 mm x 100 M
	SMGR350100			350 mm x 80 mm x 100 M
	SMGR400100			400 mm x 80 mm x 100 M
	SMGR075030			75 mm x 35 mm x 30 M
	SMGR100030			100 mm x 40 mm x 30 M
	SMGR150030			150 mm x 50 mm x 30 M
	SMGR200030			200 mm x 50 mm x 30 M
	SMGR250030			250 mm x 60 mm x 30 M
	SMGR300030			300 mm x 70 mm x 30 M
	SMGR350030			350 mm x 80 mm x 30 M
	SMGR400030			400 mm x 80 mm x 30 M
平面個體袋 Sterilization Pouches, Flat	SMFP075200	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	75 mm x 200 mm
	SMFP075300			75 mm x 300 mm
	SMFP100200			100 mm x 200 mm
	SMFP100300			100 mm x 300 mm
	SMFP150300			150 mm x 300 mm
	SMFP200400			200 mm x 400 mm
	SMFP250450			250 mm x 450 mm
	SMFP300500			300 mm x 500 mm
立體個體袋 Sterilization Pouches,	SMGPI00300	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	100 mm x 40 mm x 300 mm
	SMGPI50400			150 mm x 50 mm x 400 mm
	SMGP200400			200 mm x 50 mm x 400 mm
	SMGP250480			250 mm x 60 mm x 480 mm

Gusseted	SMGP300500			300 mm x 70 mm x 500 mm
自黏袋 Self-Sealing Sterilization Pouches	SMSE057133	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	57 mm x 133 mm
	SMSE090162			90 mm x 162 mm
	SMSE070257			70 mm x 257 mm
	SMSE090257			90 mm x 257 mm
	SMSE135283			135 mm x 283 mm
	SMSE135335			135 mm x 335 mm
	SMSE180335			180 mm x 335 mm
	SMSE190358			190 mm x 358 mm
	SMSE300380			300 mm x 380 mm
	SMSE300474			300 mm x 474 mm

2. Tyvek 紙 Tyvek Paper

產品名稱 Product Name	產品編號 Product Code	產品材質 Product Material	產品規格 Product Specification	
Tyvek 平面管 袋 Sterilization Rolls, Flat	TYFR050070	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	50mm x 70M
	TYFR075070			75mm x 70M
	TYFR100070			100mm x 70M
	TYFR150070			150mm x 70M
	TYFR200070			200mm x 70M
	TYFR250070			250mm x 70M
	TYFR300070			300mm x 70M
	TYFR350070			350mm x 70M
	TYFR400070			400mm x 70M
	TYFR450070			450mm x 70M
	TYFR500070			500mm x 70M
	TYFR050100			50mm x 100M
	TYFR075100			75mm x 100M
	TYFR100100			100mm x 100M
	TYFR150100			150mm x 100M
	TYFR200100			200mm x 100M
	TYFR250100			250mm x 100M
	TYFR300100			300mm x 100M
	TYFR350100			350mm x 100M
	TYFR400100			400mm x 100M
	TYFR450100			450mm x 100M
	TYFR500100			500mm x 100M
	TYFR050200			50mm x 200M
	TYFR075200			75mm x 200M
	TYFR100200			100mm x 200M
	TYFR150200			150mm x 200M
	TYFR200200			200mm x 200M
TYFR250200	250mm x 200M			
TYFR300200	300mm x 200M			
TYFR350200	350mm x 200M			
TYFR400200	400mm x 200M			
Tyvek 立體管 袋 Sterilization Rolls, Gusseted	TYGR075100	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	75 mm x 35 mm x 100 M
	TYGR100100			100 mm x 40 mm x 100 M
	TYGR150100			150 mm x 50 mm x 100 M
	TYGR200100			200 mm x 50 mm x 100 M
	TYGR250100			250 mm x 60 mm x 100 M
	TYGR300100			300 mm x 70 mm x 100 M
TYGR350100	350 mm x 80 mm x 100 M			

	TYGR400100			400 mm x 80 mm x 100 M
Tyvek 平面個體袋 Sterilization Pouches, Flat	TYFP075200	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	75 mm x 200 mm
	TYFP075300			75 mm x 300 mm
	TYFPI00200			100 mm x 200 mm
	TYFPI00300			100 mm x 300 mm
	TYFPI50300			150 mm x 300 mm
	TYFP200400			200 mm x 400 mm
	TYFP250450			250 mm x 450 mm
	TYFP300500			300 mm x 500 mm
Tyvek 立體個體袋 Sterilization Pouches, Gusseted	TYGPI00300	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	100 mm x 40 mm x 300 mm
	TYGPI50400			150 mm x 50 mm x 400 mm
	TYGP200400			200 mm x 50 mm x 400 mm
	TYGP250480			250 mm x 60 mm x 480 mm
	TYGP300500			300 mm x 70 mm x 500 mm

B. 所有產品規格:

項目 #	產品名稱 Product Name	產品型號 Product Code	產品材質 Product Material		產品規格 Product Specification	
			1	2	L	W
1	平面管袋 Sterilization Rolls, Flat	SMFR	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	10~300M	50~800mm
2	立體管袋 Sterilization Rolls, Gusseted	SMGR	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	10~300M	75~800mm
3	Tyvek 平面管袋 Tyvek Sterilization Rolls, Flat	TYFR	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	10~300M	50~800mm
4	Tyvek 立體管袋 Tyvek Sterilization Rolls, Gusseted	TYGR	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	10~300M	75~800mm
5	平面個體袋 Sterilization Pouches, Flat	SMFP	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	50~1000mm	30~800mm
6	立體個體袋 Sterilization Pouches, Gusseted	SMGP	50~80g/m ² 醫療紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	75~1000mm	75~800mm
7	Tyvek 平面個體袋 Tyvek Sterilization Pouches, Flat	TYFP	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	50~1000mm	30~800mm
8	Tyvek 立體個體袋 Tyvek Sterilization	TYGP	50~80g/m ² Tyvek 紙 Tyvek Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	75~1000mm	75~800mm

	Pouches, Gusseted					
9	自黏袋 Self-Sealing Sterilization Pouches	SMSE	50~80g/m ² 醫療 紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+CPP) 42~72um	50~800mm	30~500mm
10	平面個體袋 Sterilization Pouches, Flat Paper to Film	PTF	50~80g/m ² 醫療 紙 Medical Paper	麥拉 Film(PET+PE) 42~72um	50~1000mm	30~800mm
11	平面個體袋 Sterilization Pouches, Flat Pater to Paper	PTP	40~90g/m ² 醫療 紙 Medical Paper	40~90g/m ² 醫療 紙 Medical Paper	50~1000mm	30~800mm
12	膜膜袋 Film Pouches, Film to Film	FFNB55	麥拉 Film(PET+PE) 52um	麥拉 Film(PET+PE) 52um	50~1000mm	30~800mm
		FFNB77	麥拉 Film(PET+PE) 72um	麥拉 Film(PET+PE) 72um		
		FFNW65	乳白易撕膜 (MOP+PET+PE) 65um	麥拉 Film(PET+PE) 52um		
		FFES69	易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 64um	非易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 90um		
		FFES99	易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 90um	非易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 90um		
		FFES95	易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 90um	麥拉 Film(PET+PE) 52um		
		FFES97	易撕鋁箔膜 (PET+Al+NY+PE) 90um	麥拉 Film(PET+PE) 72um		



“十美牌”包裝消毒袋 SIGMA Sterilization Pouch

衛署醫器製字第 001212 號

平面管袋 SMFR(透明或綠色或藍色膜)



立體管袋 SMGR(透明或綠色或藍色膜)



平面個體袋 SMFP (透明或綠色或藍色膜)



立體個體袋 SMGP (透明或綠色或藍色膜)



自黏袋 SMSE (透明或綠色或藍色膜)



膜膜袋 FFES69、FFES95、FFES97、FFES99(鋁箔袋)



膜膜袋 FFNB55、FFNW65、FFNB77 (乳白膜或透明膜)



